

Einfach im Handling,  
sicher in der Anwendung



## **Titan Clip**

Die sterile, biokompatible Nahtklemme  
für die Transanale Endoskopische Mikrochirurgie

# Titan Clip

Einfach im Handling, sicher in der Anwendung

Titan erfüllt höchste Anforderungen hinsichtlich Biokompatibilität und Immuntoleranz. Auch die bewährten Nahtklemmen von Richard Wolf sind ab sofort in dieser Materialausführung erhältlich. Sie erweitern damit das leistungsfähige Komplettsortiment für die transanale endoskopische Mikrochirurgie (TEM) in qualitativer Hinsicht.

## Nahtklemmen aus Titan


- Biokompatibles Implantatmaterial, kann langfristig im Körper verbleiben
- Die besondere Formgebung der Clip-Innenseite gibt dem Faden perfekten Halt

## Einfach im Handling

- Deutlich erleichterte Entnahme und Applikation durch neues Aufnahmeteil
- Weniger Aufwand im Vorfeld der OP durch Sterilverpackung
- "Procedure Pack" optimal für größere Defekte

## Bewährte Anwendung

Die präzise, bewährte Klemmzange 8840.762 von Richard Wolf kann weiterhin verwendet werden.

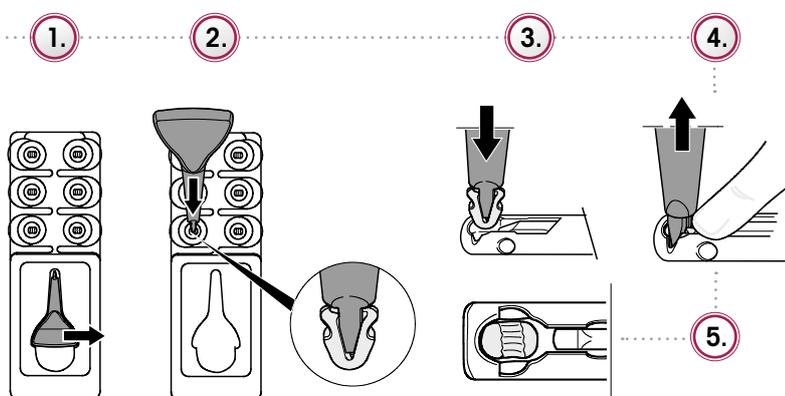

### Titan Clip, steril

VE = 10 Einheiten, Titan Clip steril verpackt (á 6 Stück)

inkl. Aufnahmeteil für Clip ..... 4840764

## Steril verpackt, schnell appliziert

1. Aufnahmeteil aus der Packung nehmen
2. Mit der Spitze den Titan Clip in der Packung aufnehmen
3. Titan Clip in die Aufnahme kammer der Klemmzange drücken bis er einrastet
4. Aufnahmeteil mit leichtem Daumengedruck entfernen
5. Fertig