

Quick Guide

pour le traitement manuel

Endoscopes flexibles de Richard Wolf



Le Quick Guide est un aperçu. Il ne remplace pas le mode d'emploi spécifique de l'endoscope flexible correspondant.

Respecter impérativement le mode d'emploi correspondant.

Le Quick Guide peut uniquement être utilisé en complément du mode d'emploi.

Pré lavage / Test d'étanchéité	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12
	13	14	15	16
Nettoyage manuel	17	18	8691	
	19	20	21	22
Rinçage Séchage	23	24	25	
	26	27	28	29
Désinfection Rinçage	30	31	32	33
	34	35	36	37

Séchage Entretien	19	20	21	22
	23	24	25	
Stérilisation H ₂ O ₂ , LTSF, OE	26	27	28	29
	30	31	32	33
Emballage Stockage	34	35	36	37
	38	39	40	41

... nous recommandons pour cela :

- Bac de désinfection RIWO-Box 600x400 mm, REF 68603
- Bac de désinfection RIWO-Box 880x200 mm, REF 68602
- Pistolet de nettoyage à jet d'eau avec embouts, REF 6199.00
- Testeur d'étanchéité pour endoscopes flexibles, REF 163.903
- Soupape de compensation de pression, REF 163.904
- Brosses de nettoyage voir tableau séparé

Brosses de nettoyage recommandées	Diamètre en mm	Couleur	Longueur de la brosse en mm	Longueur totale en mm	Utilisation		Type	
					Dans le canal de travail et laser	Dans les endoscopes flexibles		
Brosse de nettoyage à usage unique (UE = 10 pcs)	2	Jaune	15	1200	∅ 1,0 - 1,5 mm	7223.xxx 7325.xxx 7326.xxx	7330.xxx 7331.xxx	7990001
	3	Vert	20	1200	∅ 2,0 - 2,5 mm	7250.011 7265.xxx 7268.xxx 7269.xxx 7270.xxx	7305.xxx 7308.xxx 7309.xxx 7310.xxx	7990002
	0,85	Bleu	10	1200	∅ 0,8 mm	7356xxx		7990003
	5	Blanc	20	1200	∅ 2,5 - 3,5 mm	7235xxx 7236xxx 7260xxx 7315xxx		7990005
Brosse de nettoyage, droit, pour usage unique	-	Noir	25	-	-	-	-	8691