

Quick Guide

zur manuellen Aufbereitung

Flexible Endoskope von Richard Wolf



Der Quick Guide ist eine Übersicht. Er ersetzt nicht die spezifische Gebrauchsanweisung des jeweiligen flexiblen Endoskops. Die jeweilige Gebrauchsanweisung muss unbedingt beachtet werden. Der Quick Guide kann nur als Ergänzung der Gebrauchsanweisung benutzt werden.

Vorreinigung / Dichtigkeittest	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12
	13	14	15	16
Manuelle Reinigung	17	18	19	
	20			
Spülen Trocknen	21		22	
	23			
Desinfektion Spülen	24		25	
	26			

Trocknen Pflegen	19	20	21	22	...wir empfehlen dazu:
	23				
Sterilisation H ₂ O ₂ , NTFD, EO	24		25		<ul style="list-style-type: none"> • RIWO-Box Desinfektionswanne 600x400mm, REF 68603 • RIWO-Box Desinfektionswanne 880x200mm, REF 68602 • Wasserstrahl-Reinigungspistole inkl. Ansätze, REF 6199.00 • Dichtigkeitstester für flexible Endoskope, REF 163.903 • Druckausgleichsventil, REF 163.904 • Reinigungsbürsten siehe separate Tabelle
	26				
Verpacken Lagern	27				
	28				

Empfohlene Reinigungsbürsten	Durchmesser in mm	Farbe	Bürstenlänge in mm	Gesamtlänge in mm	Verwendung		Type	
					in Arbeits- & Laserkanal	in den flexiblen Endoskopen		
Reinigungsbürste zum Einmalgebrauch (VE = 10 St.)	2	Gelb	15	1200	∅ 1,0 - 1,5 mm	7223.xxx 7325.xxx 7326.xxx	7330.xxx 7331.xxx	7990001
	3	Grün	20	1200	∅ 2,0 - 2,5 mm	7250.011 7265.xxx 7268.xxx 7269.xxx 7270.xxx	7305.xxx 7308.xxx 7309.xxx 7310.xxx	7990002
	0,85	Blau	10	1200	∅ 0,8 mm	7356xxx		7990003
	5	Weiß	20	1200	∅ 2,5 - 3,5 mm	7235xxx 7236xxx 7260xxx 7315xxx		7990005
Reinigungsbürste gerade, zum Einmalgebrauch	-	Schwarz	25	-	-	-	-	8691