

Quick Guide

zur manuellen Aufbereitung

Flexible Endoskope von Richard Wolf



Der Quick Guide ist eine Übersicht. Er ersetzt nicht die spezifische Gebrauchsanweisung des jeweiligen flexiblen Endoskops. Die jeweilige Gebrauchsanweisung muss unbedingt beachtet werden. Der Quick Guide kann nur als Ergänzung der Gebrauchsanweisung benutzt werden.

Vorreinigung / Dichtigkeittest	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12
	13	14	15	16
Manuelle Reinigung	17	18	19	
	20			
Spülen	21		22	
	23			
Trocknen	24		25	
	26			
Desinfektion	27		28	
	29			

Trocknen Pflegen	19	20	21	22	... wir empfehlen dazu:
	23				
Sterilisation H ₂ O ₂ , NTDF, EO	24	25	26	27	<ul style="list-style-type: none"> • RIWO-Box Desinfektionswanne 600x400mm, REF 509.81 • RIWO-Box Desinfektionswanne 881x200mm, REF 6860.911 • Wasserstrahl-Reinigungspistole inkl. Ansätze, REF 6199.00 • Dichtigkeittestester für flexible Endoskope, REF 163.903 • Druckausgleichsventil, REF 163.904 • Einwegfilter zur Sterilisation im Sterisafe® DURO A3 für H₂O₂ (VE = 100 ST), REF 38203401 • Einwegfilter zur Sterilisation im Sterisafe® DURO A3 für NTDF und EO (VE = 100 ST), REF 38203501 • Sterisafe® Sicherungsplombe (VE = 100ST), REF 382031202 • Reinigungsbürsten siehe separate Tabelle
	28				
Verpacken Lagern	29		30		
	31				

Empfohlene Reinigungsbürsten	Durchmesser in mm	Farbe	Bürstenlänge in mm	Gesamtlänge in mm	Verwendung			Type
					in Arbeits- & Laserkanal	in den flexiblen Endoskopen		
Reinigungsbürste zum Einmalgebrauch (VE = 10 St.)	2	Gelb	15	1200	∅ 1,0 - 1,5 mm	7223.xxx 7325.xxx 7326.xxx	7330.xxx 7331.xxx	7990001
	3	Grün	20	1200	∅ 2,0 - 2,5 mm	7265.xxx 7268.xxx 7269.xxx 7270.xxx	7305.xxx 7308.xxx 7309.xxx 7310.xxx	7990002
	0,85	Blau	10	1200	∅ 0,8 mm	7356xxx		7990003
Reinigungsbürste zum Einmalgebrauch (VE = 100 St.)	5	Weiß	20	1800	∅ 2,5 - 3,5 mm	7260xxx 7315xxx		7990004
Reinigungsbürste, wiederverwendbar	-	Schwarz	42	-	-	-	-	86.90