

Guia rápido

para o reprocessamento manual

Endoscópios flexíveis Richard Wolf



Guia Rápido é uma visão geral. Não substitui as instruções específicas para uso do respectivo endoscópio flexível.

As respectivas instruções de uso devem ser observadas.

Guia Rápido só pode ser utilizado como um complemento às instruções de uso.

Preparação / Teste de vazamento	1	2	3	4
	5	6	7	8
Limpeza Manual	9	10	11	12
	13	14	15	16
Lavagem Secagem	17	18	19	20
	21	22	23	24
Desinfecção Lavagem	25	26	27	28
	29	30	31	32

Secagem Manutenção	19	20	21	22
	23	24	25	26
Esterilização H ₂ O ₂ , LTSF, OE	27	28	29	30
	31	32	33	34
Embalagem Armazenamento	35	36	37	38
	39	40	41	42

...nós recomendamos:

- Bacia de desinfecção RIWO-Box 600x400mm, REF 509.81
- Bacia de desinfecção RIWO-Box 881x200mm, REF 6860.911
- Jato de limpeza a água incl. montagem, REF 6199.00
- Testador de vazamentos para endoscópios flexíveis, REF 163.903
- Válvula de equalização de pressão, REF 163.904
- Filtro descartável para esterilização em Sterisafe® DURO A3 para H₂O₂ (embalagem = 100 unidades), REF 38203401
- Filtro descartável para esterilização em Sterisafe® DURO A3 para LTSF e OE (embalagem = 100 unidades), REF 38203501
- Selo Sterisafe® Safety (embalagem = 100 unidades), REF 382031202
- Para escovas de limpeza, consulte tabela separada

Escovas de limpeza recomendadas	Diâmetro em mm	Cor	Comprimento da escova em mm	Comprimento total em mm	Aplicação		Referência	
					em canal de trabalho & de laser	em endoscópios flexíveis		
Escova de limpeza para uso único (pacote = 10 peças)	2	Amarelo	15	1200	∅ 1,0 - 1,5 mm	7223.xxx 7325.xxx 7326.xxx	7330.xxx 7331.xxx	7990001
	3	Verde	20	1200	∅ 2,0 - 2,5 mm	7265.xxx 7268.xxx 7269.xxx 7270.xxx	7305.xxx 7308.xxx 7309.xxx 7310.xxx	7990002
	0,85	Azul	10	1200	∅ 0,8 mm	7356xxx		7990003
Escova de limpeza para uso único (pacote = 100 peças)	5	Branco	20	1800	∅ 2,5 - 3,5 mm	7260xxx 7315xxx		7990004
Escova de limpeza reutilizável	-	Preto	42	-	-	-	-	86.90