

Quick Guide
zur manuellen Aufbereitung

Flexible Endoskope von Richard Wolf



Der Quick Guide ist eine Übersicht. Er ersetzt nicht die spezifische Gebrauchsanweisung des jeweiligen flexiblen Endoskops. Die jeweilige Gebrauchsanweisung muss unbedingt beachtet werden. Der Quick Guide kann nur als Ergänzung der Gebrauchsanweisung benutzt werden.

Grid of 18 numbered steps for manual cleaning and disinfection of flexible endoscopes, including images and instructions for each step.

Additional cleaning and maintenance steps (19-25) including drying, sterilization, and packaging instructions.

- ...wir empfehlen dazu:
• RIWO-Box Desinfektionswanne 600x400mm, REF 68603
• RIWO-Box Desinfektionswanne 880x200mm, REF 68602
• Wasserstrahl-Reinigungspistole inkl. Ansätze, REF 6199.00
• Dichtigkeitstester für flexible Endoskope, REF 163.903
• Druckausgleichsventil, REF 163.904
• Reinigungsbürsten siehe separate Tabelle

Table with 8 columns: Empfohlene Reinigungsbürsten, Durchmesser in mm, Farbe, Bürstenlänge in mm, Gesamtlänge in mm, Verwendung (in Arbeits- & Laserkanal, in den flexiblen Endoskopen), Type. It lists various cleaning brushes and their specifications.