

セントラルCO₂-ガスパイピングへのCO₂-Pneusの接続のための接続チューブ 8170.311/.3111

1 一般事項

CE	製品および/又は梱包にこの識別マークが付いている場合のみ、その製品が医療用製品基準93/42/EECに基づく製品と証明されます。クラス II a 以上の製品、同様に滅菌済製品または機能測定クラス I の製品には、その指定された場所に告示内容 (0124) の証明番号が記載されております。
-----------	--

2 使用規定

接続チューブ8170.311/.3111は、DIN 13260に準拠した医療ガスのセントラルCO₂-ガスパイピングへCO₂-Pneusを接続するために使用されます。

重要!

本使用説明書に加えて、必ずこの製品と組み合わせて使用される製品の使用説明書及び最新のCO₂-Pneuの使用説明書も遵守されなければなりません。


3 セットアップ



警告!

圧力下にあるチューブ末端による損傷の危険。

CO₂-Pneuの接続が出来るまで、プラグを壁配管接続部内に差し込まないでください。

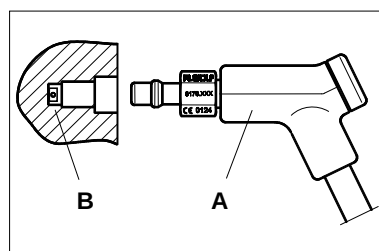

- それぞれの使用説明書に従って、最初に接続チューブをCO₂-Pneuに接続してください。
- 差込栓(A)をCO₂-ガス用の壁配管接続部に接続し、正確な固定具合を点検してください。
- ◆ 接続チューブが正確に差し込まれた後初めてCO₂-Pneuのスイッチを入れてください。

重要!

“新しい” 差込栓と “古い” 摂取部 (CO₂) でのガス摂取は不可能です。

逆止めバルブ付き摂取部(開閉ボルト)(B)を、直径6,7 mmの物に変えてください。

4 使用

CO₂-Pneu 2245 用のみ(使用説明書HA-E158を参照)

圧力計の表示は緑色の範囲内ではなく、セントラルCO₂-ガスパイピングの圧力(5 バール)を表示します。圧力貯蔵は、ガス供給装置の監視ユニットによって保障されております。

5 再生処理

重要!

最新の“R.Wolf社製品、アクセサリ、装置の再生処理に関する注意事項”、注文番号: GA-J 020に従ってください。
接続チューブを液体の中に浸漬しないでください。

- 接続チューブは、表面消毒剤、アルコールまたはエチルアルコールを浸したやわらかい布で清掃してください。消毒剤メーカーの指示に従ってください!

6 テクニカルデータ及び注文情報

本製品は、関連する技術仕様および特定の目的を考慮した上で、個々に組み合わせることが可能です。全体的な概要については、最新のカタログやパンフレットを参照するか、Richard Wolf 社または販売代理店までお問い合わせください。

最大圧力	6 バール
長さ	5,0 m
壁側接続部	DIN EN 13260-2 (01.2004以降)適合
装置側接続部	M 12x1,5、パッキンヘッド 24°

GA-M 016 / ja / Index: 02-06-1.0 / ÄM: KG 05-101

7 操作、保管、輸送条件

操作条件	+10°C から +40°C, 相対湿度 30% から 75%, 気圧 700 hPa から 1060 hPa
保管、輸送条件	- 20°C から + 60°C、相対湿度 10% から 90%、気圧 700 hPa から 1060 hPa

指示！

製品輸送時の製品の損害を防止するため、輸送される時は純正の梱包材を使用することをお勧め致します。

8 製品、梱包材及びアクセサリーの廃棄について

本製品を廃棄する場合は、地方自治体の条例(規則)に従ってください。

◆ 詳細に関しては、メーカーへお問い合わせください。

重要な一般注意事項

本製品は、使用規定に則り、使用説明書の注意に従って、適切な訓練を受けた有資格の医療職員のみが使用してください。メンテナンスおよび修理は、必ず当社が正式に認可した専門職員のみが行って下さい。

製品は、使用説明書に記載されている組合せ及びアクセサリーやスペアパーツと一緒にのみ使用してください。他の組合せ、アクセサリー及びスペアパーツを使用する場合は、その使用のために限定され、性能特徴並びに安全性を損なわない場合にのみ使用してください。

患者、使用者及び第三者の安全保護するために、使用前又は修理で返送する前に、使用説明書に従って、製品を再生処理してください。

技術変更の所有！

継続的に製品開発を行っているため、イラストやテクニカルデータは、この使用説明書のものから多少変更になる場合があります。

安全表示構図

シンボル	危険レベル
	警告！ 注意を怠りますと、死傷事故の可能性あります。
	注意！ 注意を怠りますと、怪我をしたり製品に損傷を与える場合があります。
	重要！ 注意を怠りますと、装置や周辺装置に損傷を与える場合があります。
	指示！ 最適な使用方法及び有益な情報。

ドイツ
RICHARD WOLF GmbH
75438 Knittlingen
Pforzheimerstr. 32
Telephone: +49 70 43 35-0
Telefax: +49 70 43 35-300
MANUFACTURER
info@richard-wolf.com
www.richard-wolf.com

ベルギー / オランダ
N.V. Endoscopie
RICHARD WOLF Belgium S.A.
Industriezone Drongen
Landegemstraat 6
9031 Gent Drongen
Telephone: +32 92 80 81 00
Telefax: +32 92 82 92 16

endoscopy@richard-wolf.be
www.richard-wolf.be

マーケティング オフィス
アラブ首長国連邦
RICHARD WOLF Middle East
P.O. Box 500283
AL Thuraya Tower 1
9th Floor,
Room 904, Dubai
Telephone: + 9 71 43 68 19 20
Telefax: + 9 71 43 68 61 12
middle.east@richard-wolf.com
www.richard-wolf.com

アメリカ
RICHARD WOLF
Medical Instruments Corp.
353 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061
Telephone: +1 84 79 13 11 13
Telefax: +1 84 79 13 14 88
sales&marketing@richardwolfusa.com
www.richardwolfusa.com

フランス
RICHARD WOLF France S.A.R.L.
Rue Daniel Berger
Z.A.C. La Neuville
51100 Reims
Telephone: +33 3 26 87 02 89
Telefax: +33 3 26 87 60 33

endoscopes@richardwolf.fr

インド
RICHARD WOLF India Private Ltd.
JMD Pacific Square
No. 211 A, Second Floor
Behind 32nd Milestone
Gurgaon - 122 001
National Capitol Region
Telephone: + 91 12 44 31 57 00
Telefax: + 91 12 44 31 57 05
india@richard-wolf.com
www.richard-wolf.com

英国
RICHARD WOLF UK Ltd.
Waterside Way
Wimbledon
SW17 0HB
Telephone: + 44 20 89 44 74 47
Telefax: + 44 20 89 44 13 11
admin@richardwolf.uk.com
www.richardwolf.uk.com

オーストリア
RICHARD WOLF Austria
Ges.m.b.H.
Wilhelminenstraße 93 a
1160 Vienna
Telephone: +43 14 05 51 51
Telefax: +43 1405 51 51 45

info@richard-wolf.at
www.richard-wolf.at